

velibra – die digitale Therapie für die häufigsten Angststörungen

Evidenzbasiert.
Leitliniengerecht.
Extrabudgetär.

- ✓ Dauerhaft zugelassenes verschreibungsfähiges Medizinprodukt
- ✓ S3-leitliniengerecht (KVT)
- ✓ Sowohl ab 18 Jahren als auch ab 65 Jahren zugelassen
- ✓ In Studie erwiesene Wirksamkeit – auch nach 6 Monaten stabil
- ✓ Evidenzbasierte Expositionsübungen
- ✓ Jederzeit flexibel einsetzbar
- ✓ Hohe Anzahl an Wiederverordnungen auf Patientenwunsch

velibra: Vorteile für Sie

velibra ist Ihre Lösung bei langen Wartezeiten und hoher Versorgungsnachfrage:

Zusätzliches Praxisangebot

Niedrigschwellig, anonym, zeitsparend

Flexibel

Alleinstehend oder begleitend einsetzbar

Budgetneutral & einfach

PZN 16879359, 90 Tage pro Verordnung,
Verlängerung möglich (180 Tage empfohlen)

Entlastend

Ohne zusätzliche Termine oder Aufwand für
Sie und Ihre Praxis



Was Sie Patient:innen über velibra sagen können

Sie können sofort starten.

velibra überbrückt Wartezeiten, ergänzt die Therapie und kann posttherapeutisch stabilisieren.

velibra ist seriös.

velibra ist ein bewährtes Therapiekonzept mit nachgewiesener Wirkung.

velibra ist individuell.

Das Programm reagiert auf Antworten, passt Schwerpunkte/Reihenfolge an und ermöglicht Fortschritte im eigenen Tempo.

velibra stärkt Sie im Alltag.

Das Programm vermittelt Wissen und regt positive Denksowie Verhaltensmuster an.

Datenschutz- und DSGVO-konform:

Serverstandort: Deutschland.

Voraussetzungen:

E-Mail-Adresse + internetfähiges Endgerät (Medium kann gewechselt werden).

Empfohlene Anwendung:

Wöchentlich 1 bis 2 Stunden



Hier können Sie kostenlose Patienteninformationen und ihre persönliche Testlizenz anfordern.

Für wen velibra geeignet ist

ICD-10

F40.01 Agoraphobie mit Panikstörung

F40.1 Soziale Phobien

F41.0 Panikstörung

F41.1 Generalisierte Angststörung

ICD-11

6B00 Generalisierte Angststörung

6B01 Panikstörung

6B02 Agoraphobie

6B04 Soziale Angststörung

velibra kann auch bei begründetem Verdacht verordnet werden.

Kontraindikationen ICD-10:

F20 Schizophrenie,

R45.8 sonstige Symptome, die die Stimmung betreffen (z.B. akute Suizidalität) ,

F23 akute vorübergehende psychotische Störungen,

F31 bipolare affektive Störungen,

F25 schizoaffektive Störungen.

So funktioniert velibra:

KVT-basiert, dialoggeführt, adaptiv

velibra ist modular aufgebaut und führt Patient:innen in virtuellen Dialogen durch zentrale KVT-Bausteine – z. B. Verhaltensaktivierung, kognitive Umstrukturierung, Probleme lösen oder Expositionstraining.

Die Patient:innen werden aktiv in den Dialog involviert und nehmen über verschiedene Antwortmöglichkeiten Einfluss auf Verlauf und Schwerpunkte ihrer Behandlung.



In diesem Video erhalten Sie einen Einblick in den Aufbau von velibra

Wirkweise von velibra in Auszügen:

- ✓ Fundiertes Wissen über Entstehung, Verlauf und Behandlung von Ängsten.
- ✓ Angstbesetzte Situationen systematisch aufsuchen, um durch die Erfahrung der Gewöhnung Ängste schrittweise abzubauen.
- ✓ Stärkung des Selbstwerts.
- ✓ Identifikation und Veränderung nicht hilfreicher Denkmuster (dysfunktionale Kognitionen).
- ✓ In sensu Expositionsübungen
- ✓ Erlernen von Techniken zur Stressregulation und zur Akzeptanz schwieriger Emotionen.

Überblick über die Studienlage

Randomisiert kontrollierte Studie (RCT).

Bereits nach 9 Wochen waren Angst- und Depressionssymptome bei velibra-Nutzer:innen signifikant reduziert im Vergleich zu Kontrollgruppe.

Nach 6 Monaten war die Verbesserung in der velibra-Gruppe weiterhin nachweisbar.

In der velibra-Gruppe verbesserten sich signifikant mehr Patient:innen so stark, dass die Diagnosekriterien der Angststörung nicht mehr erfüllt waren.

Auch die subjektive Lebensqualität verbesserte sich bei velibra-Nutzer:innen signifikant mehr



der Nutzenden mit Generalisierter Angststörung erfüllten nach 9 Wochen Therapie mit velibra nicht mehr die Kriterien zur Diagnosestellung.¹

¹ Berger T, Urech A, Krieger T et al. Effects of a transdiagnostic unguided Internet intervention ('velibra') for anxiety disorders in primary care: results of a randomized controlled trial. Psychol Med. 2017 Jan;47(1):67-80.

So verordnen Sie velibra



PZN 16879359 auf **Muster-16**
oder **E-Rezept** (Ausdruck bitte
Patient:innen mitgeben) verordnen



Patient:innen reichen das Rezept ein
(Krankenkasse oder Rezept-Service)



Gesetzliche Krankenkasse schickt den
Freischaltcode an den/die Patient:in



Freischaltcode einlösen auf
velibra.com/de/code-einloesen

Ausdruck zur Einlösung Ihres E-Rezeptes

Mia
Musterfrau

05.08.1995

Dr. med. Max Muster
Facharzt für Allgemeinmedizin
000/22222
Dr.Max.Muster@KBV-Testpraxis.de

21.06.2026



Digitale Gesundheitsanwendung
velibra
PZN: 16879359

Verordnen dürfen Ärzt:innen (z. B. Hausärzte,
Fachärzte) sowie Psychotherapeut:innen.
Eine Folgeverordnung für weitere 90 Tage wird
empfohlen.

velibra wird von allen gesetzlichen Krankenkassen
übernommen und kann auch privat Versicherten
sowie Selbstzahlenden verordnet werden.



velibra

Link zur Website:

velibra.com/de/fachkreise

Bei Fragen senden Sie uns einfach eine E-Mail:

team@velibra.com



velibra® ist ein **CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt** und eine Marke der GAIA AG | Hans-Henny-Jahnn-Weg 53 | 22085 Hamburg

Infoblatt Fachkreise | 07.2026